

Instrukcja używania
wyrobu medycznego
Dentosept® PEN ulga
w bólu

Dentosept® PEN ulga w bólu

WYRÓB MEDYCZNY

Unikalne, bezbolesne
leczenie zmian
chorobowych
i uszkodzeń
błony śluzowej
jamy ustnej.

CZY SĄ AFTY?

Afty to kilkumilimetrowe (3-4 mm) bolesne owrzodzenia na śluzówce jamy ustnej. Mają postać płytkiej nadżerki, pokrytej białym nalotem i otoczonej czerwonym, opuchniętym, zapalnym brzegiem. Zwykle występują one na wewnętrznych powierzchniach warg lub policzków, ale mogą również pojawić się zarówno pod, jak i na powierzchni języka.

W JAKI SPOŚÓB POWSTAJĄ AFTY I ZMIANY W JAMIE USTNEJ?

Afty w jamie ustnej występują z powodu zmniejszonej odporności, kiedy to w podrażnionym miejscu lub ranie rozwija się stan zapalny. Zmiany w jamie ustnej często pojawiają się również w wyniku złego dopasowania protez lub aparatów ortodontycznych. Afty i zmiany w jamie ustnej są często bardzo bolesne, zwłaszcza, gdy są narażone na działanie drażniącego pożywienia oraz/lub napojów.

JAK MOŻNA ZAPOBIEĆ AFTOM?

Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej pomaga zapobiegać infekcjom.

Należy:

- myć zęby miękką szczoteczką
- unikać pokarmów, które powodują podrażnienia, m.in. kwaśnych owoców, ostrych dań
- unikać poparzenia gorącymi pokarmami
- unikać stresu, który m.in. obniża odporność organizmu

JAK LECZYĆ AFTY I ZMIANY W JAMIE USTNEJ?

Afty i zmiany w jamie ustnej mogą powodować ból przez cały dzień. Wyrób medyczny Dentosept® PEN ulga w bólu to nowoczesna i klinicznie przetestowana formuła, która przynosi natychmiastową ulgę w bólu.

Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi, produkt można nakładać w bardzo łatwy i precyzyjny sposób. Dentosept®Pen ulga w bólu zawiera polimer, który tworzy cienką i niezauważalną warstwę ochronną, która izoluje rany i zmiany spowodowane przez pokarm, ślinę lub podrażnienia po napojach.

W ten sposób można leczyć również urazy wynikające ze źle dopasowanej protezy lub aparatu ortodontycznego.

ZASTOSOWANIE

Unikalne, bezbolesne leczenie zmian chorobowych i uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej:

- natychmiastowa ulga w bólu
- działanie już od pierwszego zastosowania
- szybkie gojenie
- długotrwała ulga w bólu*
- izolacja uszkodzeń i zmian chorobowych
- przetestowany klinicznie

**Ochrona aż do 3 godzin,
potwierdzona badaniem in vitro*

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem należy obracać podstawę aplikatora do czasu, aż całe powietrze zostanie wypchnięte i pojawi się produkt. Aplikator zawiera 60 gwarantowanych dawek. Należy dwukrotnie obrócić podstawę aplikatora, aby wypchnąć odpowiednią ilość żelu i pokryć wrzód żelem. Po aplikacji nie należy dotykać wrzodu przez kilka minut, co pozwoli na przylgnięcie warstwy ochronnej. Przylegając do błony śluzowej i języka żel może wywołać delikatne mrowienie lub odrętwienie. Jest to całkowicie bezpieczne zjawisko, które znika po chwili. Po zastosowaniu aplikatora należy dokładnie przepłukać i ostrożnie osuszyć końcówkę, po czym zamknąć aplikator. Osuszenie powierzchni wrzodu przed aplikacją żelu wspomaga jego przylganie. Wyrób medyczny Dentosept® PEN ulga w bólu może być stosowany przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 2. roku życia.

SPOSÓB UŻYCIA

Dorośli (po 12. roku życia): 3-10 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.

Dzieci (2-12 lat): maksymalnie 3 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.

OSTRZEŻENIA

Może powodować suchość w ustach oraz zaczerwienienia, opuchliznę i uczucie pieczenia w ustach w przypadku nadwrażliwości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki wyrobu.

Do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

Unikać kontaktu wyrobu z oczami.

Nie stosować po upływie terminu ważności (patrz aplikator).

Jeśli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać dawki maksymalnej ani okresu leczenia przekraczającego 14 dni.

Nie używać w okresie ciąży i karmienia piersią.

SKŁAD

Woda, polimery syntetyczne i naturalne, polisacharydy adhezyjne otrzymane z modrzewia, Laureth-9, środki konserwujące, aromaty.

Neutralny smak.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5 do 25°C i chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Po otwarciu wyrób medyczny Dentosept PEN® ulga w bólu może być używany maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i poza zasięgiem ich wzroku.

60 APLIKACJI

3,3 ml

WYTWÓRCA:


Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIUM

DYSTRYBUTOR:

Phytopharm Kłęka S.A.
Kłęka 1
63-040 Nowe Miasto
nad Wartą, Polska
www.phytopharm.pl

CE 1639

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU:

 Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania


 Zapoznaj się z instrukcją używania


 Uwaga

 Nr serii

 Termin ważności

 Wytwórca

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i poza zasięgiem ich wzroku

 Chronić przed światłem słonecznym

1055/620067/20H/
07020652/0

Data ostatniej modyfikacji
instrukcji używania:
sierpień 2020